


Návod na použití aplikačních elektronické známky



kleští k zavěšení

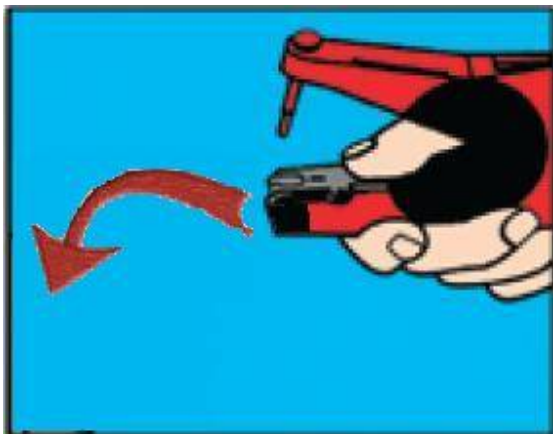

1. Vysuňte černou umělohmotnou výplň na čelisti kleští pod pružnou svorkou. (Po aplikaci elektronických ušních známek ji znovu zasuněte – kleště tak lze použít na zavěšení klasických plastových ušních známek).



2. Zmáčkněte pružnou svorku na čelisti kleští a vložte samičí díl tak, aby jeho zesílená černá část obsahující elektronický čip, byla umístěna pod svorkou.




3. Nasadte samčí díl na hrot kleští. Ujistěte se, že je tento díl nasazen úplně nadoraz na hrot kleští.



4. Ponořte kleště s nasazenou ušní značkou do antiseptické lázně, jako prevenci proti zanášení vzniklé rány, případně použijte antiseptický sprej.

Doporučené umístění elektronické ušní známky Allflex

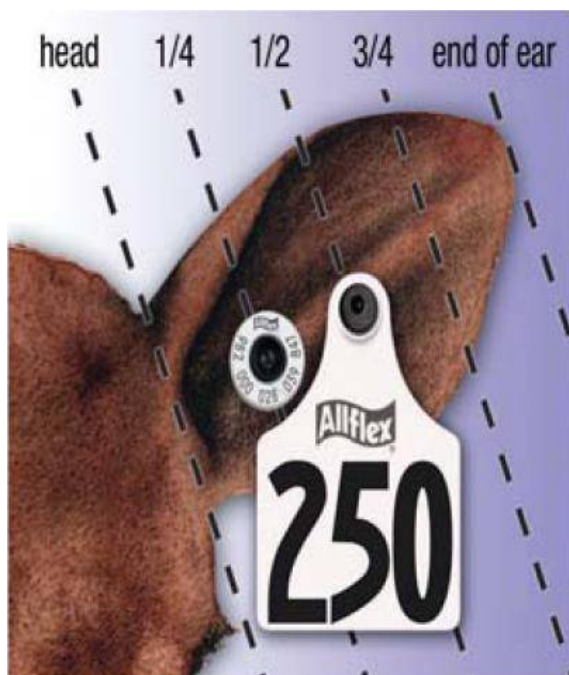

1. Místo v uchu pro umístění elektronické ušní známky musí být zbaveno jakýchkoliv nečistot.

2. Elektronická ušní známka musí být umístěna mezi dvěma chrupavkami v první čtvrtině blíže hlavy. Upozornění: jedná se o silnější část ucha a aplikace může být složitější než u klasické ušní známky, speciálně u dospělého zvířete. Z tohoto důvodu je dřík (hrot) na samičí části delší než u klasické plastové známky.

V polovině ucha je umístěna klasická ušní známka (viz obr.)

3. Samičí část elektronické ušní známky (část s čipem) musí být umístěna uvnitř ucha.

4. UPOZORNĚNÍ: "Volný prostor" mezi díly známky je důležitým faktorem pro hojení otvoru v uchu. Ujistěte se, že je dostatek místa mezi uzavřenou ušní značkou a uchem



pro proudění vzduchu a tím i snadného
hojení po aplikaci ušní známky.

**Elektronickou ušní zámku je doporučeno z důvodu následného čtení aplikovat do
levého ucha zvířete.**

TEL: 381 277 427
www.hema.cz

GSM: 602 363 714

e-mail: hema@hema.cz